



**Санкт-Петербургское Государственное Бюджетное учреждение здравоохранения
"Городская Мариинская больница"**

ОТЗЫВ

На аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный «РВЧ -1»,
ОАО «Уральский приборостроительный завод»

Аппарат РВЧ-01 служит для проведения струйной вентиляции легких. Способ подключения аппарата через интубационную трубку, катетер или маску.

Русифицирован, прост и понятен при управлении. Наличие внутреннего источника питания позволяет проводить вентиляцию в течение 2-х часов без источника основного питания. Наличие подогрева и увлажнения дыхательной смеси способствует адекватной работе. Аппарат компактен, малогабаритен, обеспечивает 2 режима вентиляции - непрерывный и прерывистый, а диапазон частоты вентиляции до 599 позволяет проводить вентиляцию по индивидуальным потребностям пациента, также можно адекватно подобрать длительность вдоха от величины дыхательного цикла от 10 до 80%. Световая и звуковая индикация мониторируемых параметров, источника питания, его отключения, сигнализация аварийных ситуаций эффективны и значительно повышают надежность аппарата. Шумовой эффект при работе с аппаратом не выходит за рамки работы приборов.

РВЧ-01 применялся при высокочастотной вентиляции у пациента с хроническим обструктивным бронхитом, при выполнении бронхоскопии жестким бронхоскопом Фриделя при бронхопульмональном свище и при остановке легочного кровотечения. Эффект вентиляции положителен, аппарат надежен, четко держит введенные параметры. Целесообразно наличие аппарата в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Заведующая ОРИТ _____ Пастухова Н.К.

Зам. глав. врача по хирургии _____ Антипова М.В.



« 16 » февраля 2012 г.